

FOIRE AUX QUESTIONS



Je ne parviens pas à faire fonctionner le VetPen®

Le fonctionnement est simple mais il nécessite des explications et un peu de pratique. L'équipe vétérinaire prendra le temps de vous expliquer son fonctionnement afin que cela devienne une habitude pour vous.

La molette ne revient pas sur la ligne de départ (—)

Gardez le doigt appuyé sur le bouton déclencheur jusqu'à ce que la molette revienne sur la ligne de départ. Vérifiez que la paume de la main ne bloque pas la rotation de la molette. Vérifiez que l'aiguille n'est pas obstruée.

Quelques gouttes perlent à l'extrémité de l'aiguille à la fin de l'injection

Assurez vous que lors de l'injection, vous avez bien attendu un minimum de 5 secondes avant de retirer l'aiguille de la peau. Au besoin, vérifiez avec votre équipe vétérinaire si votre technique est adéquate.



UTILISATION DE VetPen® EN 3 ÉTAPES

FACILITER LA GESTION DU DIABÈTE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE




Cette communication est fournie aux médecins vétérinaires en guise de matériel éducatif pour les propriétaires d'animaux diabétiques traités au Caninsulin®.


MERCK® est une marque enregistrée de Merck Sharp & Dohme Corp., utilisée sous licence. Caninsulin® et VetPen® sont des marques enregistrées d'Intervet International B.V. utilisées sous licence. © 2021 Intervet Canada Corp. Tous droits réservés. 964550 CA-VTP-210200001

1


PRÉPARATION DU VetPen®

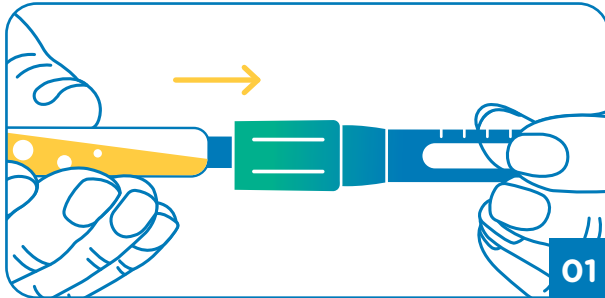

Retirez le capuchon protecteur et dévissez le corps du stylo. Retirez la cartouche usagée si besoin. Avant tout chargement, retourner la nouvelle cartouche de haut en bas au moins dix fois jusqu'à ce que l'insuline devienne uniformément laiteuse. Assurez-vous que le piston interne soit bien rétracté. Insérez la nouvelle cartouche puis vissez le corps du VetPen en place.

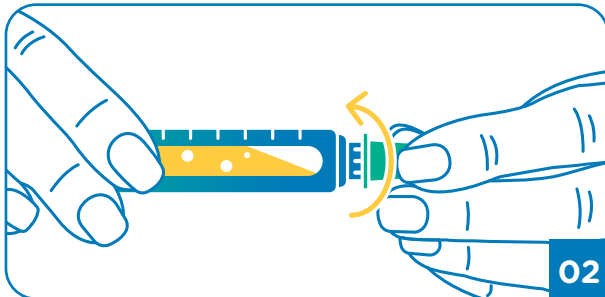


Ôter le film protecteur de la nouvelle aiguille du stylo à insuline. Visser l'aiguille directement sur le support de la cartouche. Enlever le capuchon de protection externe de l'aiguille du stylo à insuline.

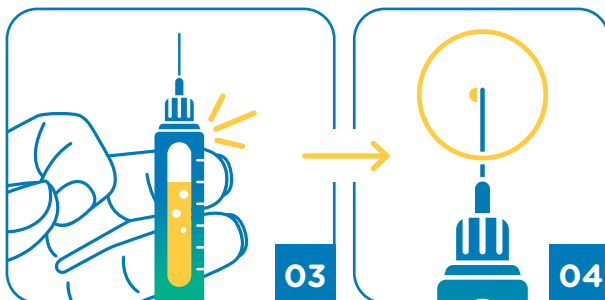


Sélectionnez une dose d'une unité. En tenant le stylo VetPen à la verticale, l'aiguille vers le haut, tapotez la cartouche avec le doigt à quelques reprises. Faites coulisser le bouton d'injection pour expulser l'air. Répétez ces étapes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'air visibles dans la cartouche et qu'une goutte d'insuline perle au bout de l'aiguille.

2

INJECTER L'INSULINE

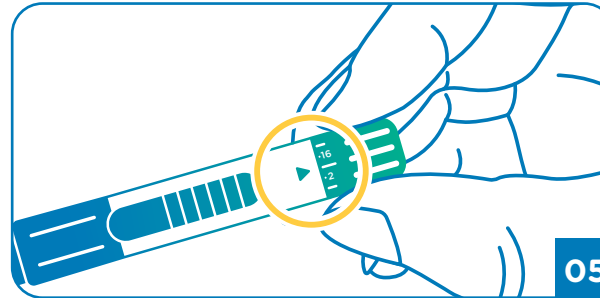


Assurez-vous que la flèche ► sur le corps du stylo à insuline pointe sur la ligne de départ (←) sur le sélecteur de dose. Choisissez le nombre d'unités d'insuline nécessaires pour votre chien ou chat, selon les recommandations prescrites par votre vétérinaire.

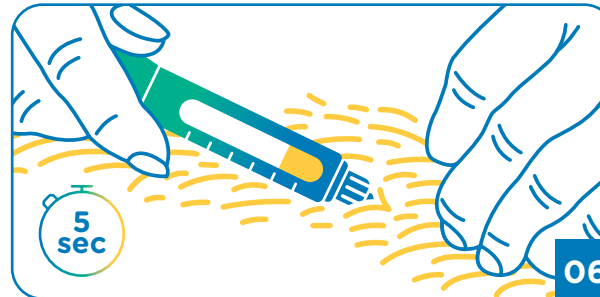

L'injection doit être effectuée par voie sous-cutanée, de 2 à 5 cm de la ligne médiane dorsale, variant de l'arrière des omoplates (épaules) à la région lombaire (mi-dos). En utilisant la méthode démontrée par votre vétérinaire, injectez l'insuline par voie sous-cutanée en poussant le bouton déclencheur en direction de l'aiguille. Gardez le doigt appuyé sur le bouton déclencheur jusqu'à ce que la ligne de départ sur la molette (←) revienne vis à vis la flèche ►. Assurez-vous que votre main ne nuise pas à la rotation de la molette. Comptez 5 secondes avant de retirer l'aiguille.

3

APRÈS UTILISATION

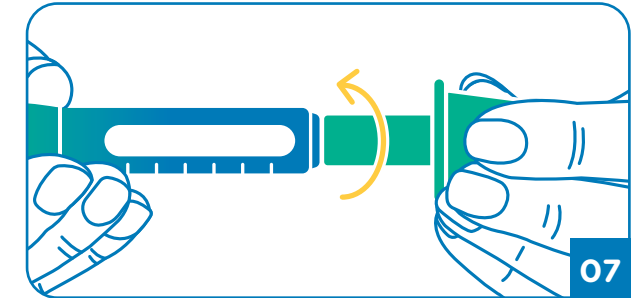

Après l'injection, retirez l'aiguille à l'aide de l'extracteur d'aiguille. Appuyez sur le bouton bleu de l'extracteur d'aiguille pour expulser l'aiguille dans un contenant approprié pour la mise au rebut des déchets médicaux. Remettez le capuchon sur le stylo à insuline. Le contenu éventuel restant dans la cartouche doit être utilisé dans les 28 jours et conservé à une température inférieure à 25 °C.



POUR RENDRE LA GESTION DU DIABÈTE DE VOTRE ANIMAL ENCORE PLUS FACILE, NOUS AVONS CRÉÉ CETTE APPLICATION POUR VOUS!

À télécharger gratuitement dès maintenant :

